


EPIGLU®

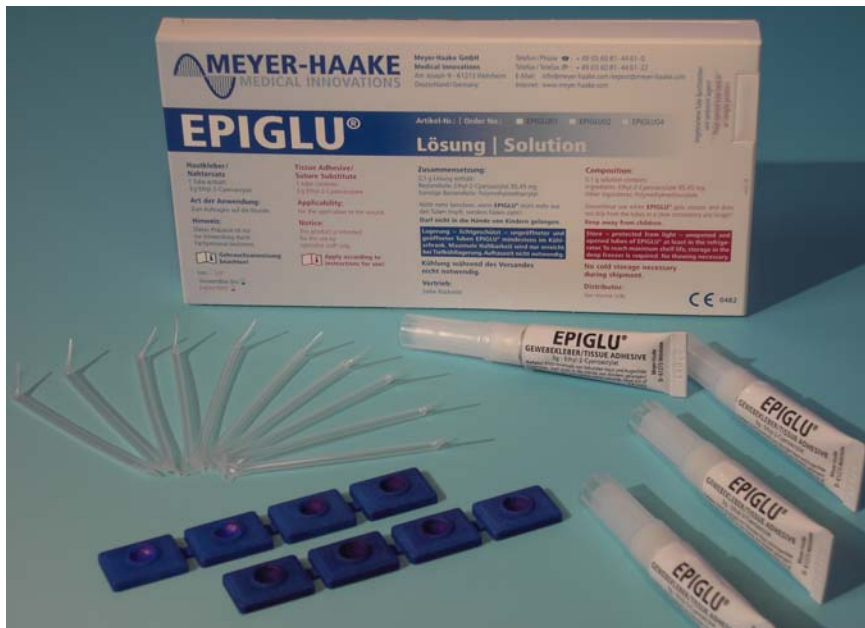

EPIGLU® sigillare *anziché* suturare

Il primo adesivo etil-2-cianoacrilato per tessuti, in tubetto, più economico di filo ed ago!

Un trattamento non è mai stato così semplice, efficace ed economico!

EPIGLU® Casi clinici – Studi di casi



Ferita fresca, profonda



Lembi della ferita adattati con EPIGLU®, chiusi totalmente con l'adesivo



Guarigione della ferita dopo 11 gg

*Ferita sulle labbra
Bambino, 4 anni*



Trattamento post-operatorio



Stato 5 giorni dopo l'intervento



Eccellente risultato dopo 10 gg

*Asportazione di nevi
sull'avanbraccio sinistro,
sutura intracutanea.
Trattamento con
EPIGLU®*



Preoperatorio



Intraoperatorio



Postoperatorio

*Nevo epidermico su
nevocellulare.
Chiusura della ferita e
stabilizzazione di
sutura con EPIGLU®*

EPIGLU® Sigillare *anziché* suturare!

Informazioni per applicazione e conservazione

EPIGLU® è veloce e semplice da adattare sui lembi della ferita, indurisce subito e stabilizza anche lembi di ferite che sono sotto tensione.

EPIGLU® viene offerto nelle seguenti confezioni:

- EPIBDP05:** tubetto da 0,3 g. + pipette dosatrici (conf. 5 tubetti)
EPIBDP10: tubetto da 0,3 g. + pipette dosatrici (conf. 10 tubetti)
EPIGLU01: tubetto da 3 g. + pipette dosatrici e piastre di dosaggio per 20 trattamenti (conf. 1 tubetto)
EPIGLU02: tubetto da 3 g. + pipette dosatrici e piastre di dosaggio per 40 trattamenti (conf. 2 tubetti)

EPIGLU-OP: 1 tubetto da 3 g. **STERILE**

+ pipette dosatrici e piastre di dosaggio per 20 trattamenti




Modo d'applicazione:

Versare direttamente dal tubetto la quantità necessaria di EPIGLU® in una delle cavità della piastra di dosaggio...

... aspirare il liquido con la pipetta dosatrice e adattarlo sui lembi della ferita oppure...

... tagliare una pipetta dosatrice e infilarla sull'applicatore del tubo, adattare EPIGLU® direttamente dal tubo sulla ferita. Questo metodo è particolarmente semplice e consente di risparmiare materiale.

Le pipette dosatrici monouso vanno utilizzate per un paziente e poi gettate via.

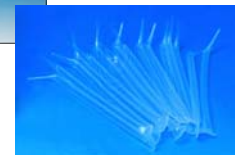

Indicazioni sulla conservazione

I tubetti di EPIGLU® già cominciati vengono conservati nell'apposita sede della confezione in posizione verticale e tenuti al freddo. Preferibilmente tenere in freezer, EPIGLU® non congela a blocco e può essere utilizzato immediatamente. Depositando EPIGLU® in freezer il materiale si conserva per 3 anni.

Considerando il lungo periodo di validità del prodotto, EPIGLU® è adatto anche laddove si trattano raramente lesioni cutanee con adesivi tissutali.



Produttore:



Meyer-Haake GmbH
Medical Innovations
Am Joseph 9 - 61273 Wehrheim
Deutschland/Germany
Telefon/Phone ☎: +49 (0) 60 81-44 61-0
Telefax/Telefax ☎: +49 (0) 60 81-44 61-22
E-Mail: info@meyer-haake.com/export@meyer-haake.com
Internet: www.meyer-haake.com

Fornitore:



IN.CAS. Srl Innovazioni Casamichele
Via Staffali 40/A - 37062 Dossobuono (VR)
Tel. +39 045 8601267 - Fax +39 045 86010909
WWW.incas-srl.com - E-mail info@incas-srl.com